

# COVID-19 | INFLUENZA A/B RSV TEST KIT

Wie jedes Jahr in der kalten Jahreszeit vermehren sich die Patienten mit Symptomen wie Kopfschmerz, Müdigkeit, Erkältung und Fieber. Um Zeit zu sparen und schnell den optimalen Behandlungsweg einzuschlagen ist unser neuer 3-fach Schnelltest das ideale Werkzeug. Ein nasaler Abstrich für drei Ergebnisse.

## VORTEILE

Schnelles Ergebnis (15 – 20 Minuten) – kein Folgetermin zur Besprechung der Testergebnisse erforderlich

Sehr einfache Handhabung in einem Arbeitsgang, keine zusätzlichen Materialien notwendig

Geschlossene Testsysteme, ohne Umfüllen

Bis zu 75% Zeitersparnis bei der Abnahme

Einfache Handhabung (siehe unsere Beispielvideos und Kurzanleitungen unter [www.assure-pen.de](http://www.assure-pen.de))


## ANWENDUNG




ECO-Test Teststift aus der Verpackung nehmen.



Stift auseinanderziehen und Schutzkappe entfernen.

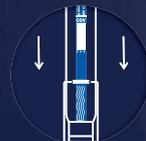

Probe entnehmen und Stift wieder zusammenstecken bis er einrastet.

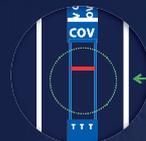

Testergebnis in < 15 Minuten ablesen.

1.

TESTSTAB



## PACKUNGSIHALT

2.

SICHERHEITS-  
KAPPE



3.

FLÜSSIGKEITS-  
BEHÄLTER



COVID 19

INFLUENZA A/B

RSV

<b>Testparameter</b>	SARS-CoV-2 Antigen, Influenza A/B, RSV
<b>Sensitivität</b>	Ct<25: 100,0%, Ct<28: 97,1%, Ct<31: 95,7%, Ct<40: 86,4%
<b>Spezifität</b>	99,20 %

<b>Probenart</b>	anterio-nasal (vorderer Nasenabstrich)
<b>Zertifizierung</b>	EU-weit zertifiziert
<b>Mutationserkennung</b>	Bestätigt durch Erkennung des N-Proteins Erkennt zuverlässig Mutationen wie z.B. DELTA, OMIKRON etc.
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate ab Produktion